


Cosmas Cup

Cosmas Cup es un dispositivo a medida que permite fijar y levantar la mama de la paciente y ayuda a eliminar sus pliegues durante el tratamiento de Radioterapia.

- **Minimiza interrupciones bajo la mama.**
- **El posicionamiento diario para reproducibilidad es rápida y precisa.**
- **Confortable para el paciente.**
- **Pequeño y no constriñe**

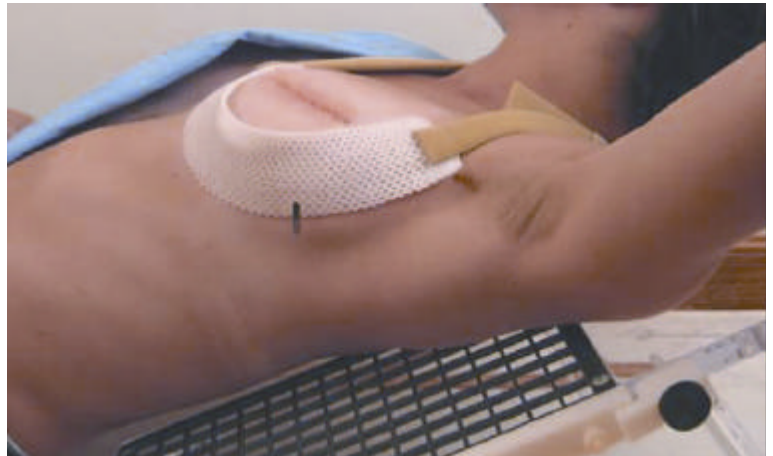

RT-1797 – Cosmas Cup

Instrucciones:

Coloque al paciente en la mesa de tratamiento.

Mientras sujeta ambas tiras de sujeción, sumerja solamente la porción de termoplástico Aquaplast RT® en agua caliente (80°C).

Saque el Aquaplast RT® del agua cuando se vuelva transparente y seque su exceso de agua con una toalla.

Moldee el dispositivo a la mama de la paciente, elevando la mama a la posición deseada para el tratamiento.

Una vez Aquaplast RT se vuelve rígido y blanco, coloque las tiras de sujeción al paciente, haciendo voltear la tira larga por detrás del cuello y fijándola a la tira corta mediante el cierre-hebilla.

Proceda con la simulación. Marque el láser lateral en el dispositivo. Mida el borde del dispositivo y márkelo con tatuaje (o rotulador) y anote la medida. Esta medida le permitirá la reproducibilidad diaria de los tratamientos seriados.

SUGERENCIAS: Para mejorar el confort del paciente, cubra el margen del dispositivo con esparadrapo para reducir molestias. Una también con esparadrapo las dos tiras juntas para disminuir la probabilidad de que se separen o muevan durante la manipulación. Recuerde advertir al paciente que use polvos talco bajo la mama para mantener la mama seca.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Referencia	Descripción	Precio
RT-1797	Cosmas Cup	31,52 €

En estos precios falta añadir el 7% de IVA – Estos precios están sujetos a las variaciones del mercado.

Telefono de atención al cliente: 902 101 638

www.surgest.com

Valles 92
08190 Sant Cugat del Valles
Barcelona (Spain)
Tel: (+34) 902 101 638
Fax: (+34) 936 743 034
e-mail: surgest@surgest.com

